

Appareil facial à traction inversée Great Lakes

Ajustement confortable . . . Prix confortable



Usage unique

Disponible en beige, bleu, rouge, rose vif et violet en petit, moyen et grand.

N° de commande

Couleur	Petit	Moyen	Grand
Beige	GTS	GTM	GTL
Bleu	GBS	GBM	GBL
Rouge	GRS	GRM	GRL
Rose vif	GPKS	GPKM	GPKL
Violet	GPRS	GPRM	GPRL

Étui pour dispositif facial, durable, à fermeture éclair, disponible en noir. N° de commande 830.

La doublure en gel du front et de la mentonnière maximise le confort (SANS LATEX)

La doublure en gel lavable et réutilisable réduit efficacement :

- Friction
- Abrasion
- Force de cisaillement
- Pression

Repose-tête

- Plus grand pour un meilleur confort du patient.
- Les clips résistants à la rupture se fixent solidement au cadre.
- Moulé en plastique léger.

Arc buccal

- Désormais fil de calibre .075.
- Une stabilité et un potentiel de tension accrus.
- Utilisé avec votre choix d'ancrage intra buccal.

Mentonnière

- Moulé au cadre pour éviter toute rotation.
- Mentonnière plus grande pour un meilleur confort du patient.
- Moulé en plastique léger.

Grâce à la légèreté de la construction en acier inoxydable et à la conformité de l'ajustement au visage, les bandeaux ne sont plus nécessaires.

Visibilité totale

- Pas d'obstruction visuelle.
- Peut être porté avec des lunettes.

Points d'ajustement

- Permet un ajustement parfait pour chaque visage, quelle que soit sa forme.

Fonction

- Classe III : Tire vers l'avant pour amener l'arcade maxillaire vers l'avant.
- Classe II : Tire vers l'avant sur la mandibule. Excellent pour amener les dents (individuelles ou section) en avant.

Élastiques : Élastiques non-latex lourds 5/16" X 7.9mm-8oz. (100/pqt)

Élastiques : Pas vendus au Canada

Instructions de montage adapté

(A) RÉGLAGES ET AJUSTEMENTS

(B) Pour rester en place pendant le sommeil, l'appareil facial doit épouser étroitement le contour du front et des joues. Les ajustements doivent être effectués en appliquant une pince de réglage aux points A et/ou B.



*Pince de réglage 220-022

(C) Ajustement pour l'adaptation à un visage plus long ou plus court. Le coussinet devrait être au-dessus des sourcils pour un contact de surface maximal, permettant au patient de parler sans déloger l'appareil facial.

(D) Empêcher l'appareil de faire pression sur la pommette.

(E) Aligner l'arc buccal directement sur les dents, légèrement sous la ligne de la bouche. Cette légère pression vers le haut maintiendra l'appareil facial plus fermement en place.

(F) Un léger ajustement vers le haut ou vers le bas peut être nécessaire pour s'adapter à la position individuelle de la mandibule et/ou à la musculature du menton.

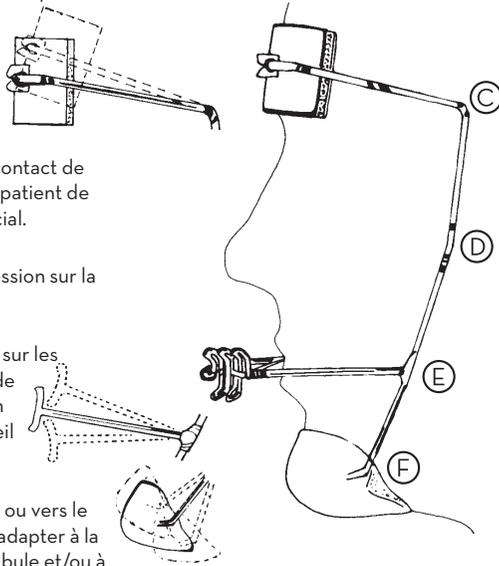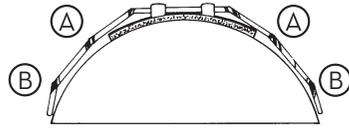

Berceau facial à traction inversée

L'appareil facial à traction inversée a été initialement conçu pour le traitement des insuffisances maxillaires et du prognathisme mandibulaire. Lorsque nos clients ont signalé des applications supplémentaires pour appareil facial à traction inversée (classe II et fermeture d'espaces), des améliorations ont été apportées. Une mentonnière a été ajoutée pour améliorer la stabilité. Le cadre a été modifié pour éviter tout déplacement, même pendant le sommeil. L'arc buccal a été révisé pour augmenter le potentiel de tension et assurer une sécurité optimale au patient.

Les retours après 30 jours sont soumis à des frais de restockage de 15 %, sauf si l'article a été endommagé lors de l'expédition ou expédié par erreur. Ceci ne s'applique pas aux appareils fabriqués sur mesure.

RAPPEL IMPORTANT POUR LES MÉDECINS !

Pour éviter tout risque de blessure aux yeux, veuillez à informer les patients et les parents des précautions à prendre lors de la mise en place et du retrait du dispositif facial. Mettez également en garde les patients contre tout jeu brutal ou dangereux lorsque le dispositif facial est en place.